

petMAP *graphic II* Instrucciones de Referencia Rápida

CONTROLES Y CONEXIONES



PANTALLA DE OPERACION



Medida de la Presión Arterial y Funciones Relacionadas

SELECCIONES DEL OPERADOR



OFF
BPcycle

OFF
LoAlarm

OFF
HiAlarm

Species
CuffSite

BP
Go/Stop

Save
Screen

Oprime y suelte para indicar la frecuencia de las medidas de presión. Cuando se ha seleccionado, una corta alarma sonara, y un mensaje aparecerá recordándole que es tiempo de tomar otra medida, pero no empezara automáticamente. Las opciones de frecuencia son STAT (ciclo de medidas rápidas para tres minutos, luego cambia automáticamente a un ciclo de 2 minutos), 1Min, 2 Min, 3 Min, 4 Min, 5 Min, 10Min, 15 Min, 20 Min, 25 Min y 30 Min. Oprime el botón marcado "BP Go/Stop" para iniciar una medida. Oprime y aguanta para apagar esta opción.

Oprime y suelte para seleccionar la alarma de límite bajo para la presión sistólica. Las opciones son 60, 80, 100, 120, 140, 160 y OFF. Oprime y aguanta para apagar esta alarma.

Oprime y suelte para seleccionar la alarma de límite alto para la presión sistólica. Las opciones son 150, 175, 200, 225, 250 y OFF. Oprime y aguanta para apagar esta alarma.

Oprime y suelte para seleccionar las opciones de especie y position del brazalette que aparecerán al tope de la pantalla. Las siete opciones son DOG (PERRO) (ForeArm [pata delantera], HindFoot [pata trasera] y Tail [cola]), CAT (GATO) (ForeArm [pata delantera], HindFoot [pata trasera] y Tail [cola]) y Optimize...None (Ninguna Optimización). La opción de ninguna optimización se debe usar con otros animales que no sean perro o gato, o cuando esté comparando el petMAP con Doppler u otros sistemas que sean oscilómetros.

Oprime y suelte para iniciar una medida nueva, o para parar una medida en proceso.

Si una tarjeta SD esta en uso, oprime para captar un imagen de la pantalla en el archivo. También cuando empujes el botón de encender/apagar, tendrás la misma opción antes que se apague (Consulte el Manual de Operadores).

DIRECCIONES DE USO (abrevia*)

- Enciende el petMAP graphic II (gII).**
Oprime y suelte el botón de encender/apagar al lado derecho de la unidad. (Consulté la sección anterior llamada CONTROLES Y CONEXIONES).
- Coloque el brazalette.**
Seleccione el brazalette adecuado, tomando en cuenta donde se colocara, el tamaño del animal, y las líneas de index y la zona óptima. Coloque el brazalette en la extremidad del animal; debe quedar ajustado, pero no muy apretado. Si es necesario, use la manguera de extensión apropiada. Conecte el brazalette o la extensión al tope de la unidad firmemente (Consulté la sección anterior llamada CONTROLES Y CONEXIONES).
- Configuración del petMAP gII.**
 - Oprime el botón marcado "Species/Cuff Site" repetidamente para cambiar las diferentes opciones. Para cuando llegue a la opción apropiada (Consulte la sección anterior llamada SELECCIONES DEL OPERADOR).
 - Si desea, se puede configurar la opción de Alarma baja y Alarma alta (Consulte la sección anterior llamada CONTROLES Y CONEXIONES).
- Midiendo la Presión Arterial con la Opción de Frecuencia Apagada.**
Para empezar una medida, toca el botón marcado "BP Go/Stop". Una tendencia de medidas de la presión arterial, y el NSV aparecerá en la esquina inferior izquierda. Una historia de las última 10 medidas se encuentra en la esquina inferior derecha. NOTA: El formato de la apariencia de la información se puede cambiar a solo enseñar una tendencia más larga si toca la tendencia.
- Midiendo la Presión Arterial con la Opción de Frecuencia Encendida.**
La frecuencia de medida se puede cambiar si oprime el botón marcado "BP cycle" repetidamente hasta que llegue a la frecuencia que desea. Oprime el botón marcado "BP Go/Stop" para iniciar una medida. Una corta alarma sonara y un mensaje aparecerá en la pantalla cuando es tiempo de medir otra vez. Todas las medidas son iniciadas por el operador cuando se oprime el botón marcado "BP Go/Stop".