

# petMAP<sup>TM</sup> graphic Tarjeta de Referencia Rápida



## 1. Coloque el brazalete

- Seleccione en que extremidad colocar el brazalete para tomar la presión arterial (pata delantera o cola son los dos lugares preferidos, la pierna de atrás es la última opción).
- Seleccione el brazalete que tiene el tamaño adecuado para el animal (el tamaño será determinado por el lugar donde el brazalete será aplicado, el tamaño del animal y las líneas de indicación del brazalete).
- Coloque el brazalete en la extremidad del animal. El brazalete debe quedar ajustado.

## 2. Configuración del petMAP

- El botón de arriba a la izquierda es para encender el petMAP y cambiar de pantalla (vea la figura 1).
- El botón de arriba a la derecha es el botón multifunción utilizado para cambiar la selección de especies y posición del brazalete (vea la figura 1).
- Conecte el tubo del brazalete a él conector del petMAP (vea la figura 1).

## 3. Toma las medidas

- Apriete suavemente el inflador para inflar el brazalete. Note la presión marcada en la pantalla. La presión de inflo inicial debe ser de 40 a 50mmHg por encima de lo que se anticipa ser la presión sistólica del animal. Si la presión sistólica del animal es desconocida, infle a aproximadamente 220. No sobre infle.
- Deje que el petMAP se desinfe automáticamente. Una vez que se ha desinflado por completo, los valores de la presión arterial se mostrarán en la pantalla.
- Si hay mucho movimiento por parte del animal, suelta la presión empujando hacia abajo el gatillo rojo (vea la figura 1). Una vez que se libere la presión de la unidad y el animal está tranquilo, cierra el gatillo rojo empujando hacia arriba y comienza una nueva medida.
- Un mínimo de 3 a 5 medidas se recomienda, o hasta que los valores obtenidos son similares.

## 4. Revisión de las medidas

- Para ver una representación gráfica de los resultados, presione el botón de encender una vez (vea la figura 2).
- Para ver una lista de los resultados, presione el botón de encender por segunda vez (vea la figura 3).

## 5. Apagar

- Para apagar el petMAP presione los dos botones en el tope, al mismo tiempo, o presione el botón de encender por 4 segundos.

*Note: Una nueva sesión de medidas se inicia cuando se apaga y se enciende el petMAP. Al encender el NSV de la sesión anterior se muestra, y los valores de las medidas anteriores también están disponibles hasta que el brazalete se infle para iniciar la próxima sesión.*

*Esta tarjeta de referencia rápida se debe utilizar en combinación con el manual del operador del producto. Si el usuario tiene preguntas que no están contestadas en el manual del operador, consulte [www.petmap.com](http://www.petmap.com) o póngase en contacto con Servicio al Cliente llamando al (800) 231-6370 o (813) 289-5555.*